

Nouzového volání sestra – pacient SOS 3000

Návod k obsluze

System nouzového volání sestra – pacient SOS 3000 se pro uživatele skládá ze zobrazovacích jednotek, tlačítek nouzového volání pro pacienty, nulovacích tlačítek a pagerů pro personál. Jednotlivá volání nebo události jsou zobrazovány na velkoplošných displejích zobrazovacích jednotek a na pagerech. Význam zobrazení je popsán u příslušných obrázků. V případě, že je v systému více volání zároveň, jsou údaje zobrazovány postupně, tzv. rolváním.

Zobrazení na displeji může být doprovázeno akustickou signalizací. Volání asistenční, WC, koupelna mají prioritu a pro snadné rozlišení zároveň odlišnou akustickou signalizací.

Vypnutí volání je možné pouze v bezprostřední blízkosti volacího tlačítka, ze kterého bylo volání aktivováno.



Trojmístné označení místa volání
(patro, pokoj, lůžko apod.)

LED ukazatel stavu napájení
Svítí trvale – napájení OK
Bliká – ztráta napájení
zavolat servis – nutné !!!

Typ volání

1 = nouzové volání
2 = asistenční volání
3 = WC, koupelna
5 = narušení prostoru
6 = požární alarm
L = slabá baterie tlačítka
zavolat servis – nutné !!!

Mobilní tlačítko nouzového volání slouží pacientům k přivolání ošetřujícího personálu. Volání se aktivuje stiskem velkoplošného tlačítka se symbolem zvonku. O správném stisknutí je pacient informován opticky i akusticky.



Kontrolka potvrzení činnosti

IR - vstup senzoru pro komunikaci s nulovacím tlačítkem

Plošné tlačítko pro inicializaci volání

Mobilní nulovací tlačítko slouží k nulování volání při příchodu sestry k nebo k aktivaci asistenčního volání. Tlačítko je nutné namířit na IR senzor příslušného volacího tlačítka ze vzdálenosti 2 cm a stisknou tlačítko požadované funkce. Příjem signálu je potvrzen opticky i akusticky volacím tlačítkem. Pokud je vzdálenost tlačítka od IR senzoru větší, potvrzení nepřijde a signál není vyslán.

V systémech s archivací dat je možné mobilní nulovací tlačítko personifikovat pro snadné dohledání poskytované péče konkrétními osobami.



Tlačítko asistenčního volání (zlaté)

Tlačítko nulování – potvrzení příchodu sestry (stříbrné)


Pager je nutné pravidelně dobíjet v nabíječce. Dobíjení začne zasunutím pageru do nabíječky až nadoraz. Pravidelné nabíjení je nutné pro správnou funkci pageru. Z tohoto důvodu je vhodné rozlišovat pager pro denní a noční provoz. **Pager pro denní provoz se v době noční směny nabíjí a naopak.**

Pager, který je v nabíječce, je VYPNUTÝ !!! , nemůže tedy přijímat žádné informace.

Pager je nutné po vyndání z nabíječky vždy zapnout delším stiskem tlačítka LIST/ON.

Po zapnutí pageru a po uplynutí 1 minuty se pager uvede do klidového stavu a na displeji se zobrazí symbol stavu baterie.

Všechna volání SOS 3000 jsou zobrazována na displeji pageru. Tlačítkem LIST/ON je možné procházet historii volání. Tyto údaje jsou v provozu přepisovány údaji novými, takže uživatel má k dispozici posledních 20 událostí. **Údaje zobrazované na displeji pageru není možno v provozu mazat, ale pouze číst. K vymazání všech údajů pageru dojde vždy při jeho vypnutí v nabíječce.** Pokud je systém vybaven zařízením pro uchování a vyhodnocování provozních dat, jsou příslušné údaje zaznamenávány v tomto systému a zachovány pro další využití v budoucnosti (např. kontrola personálu, prokazování péče při sporech apod.).

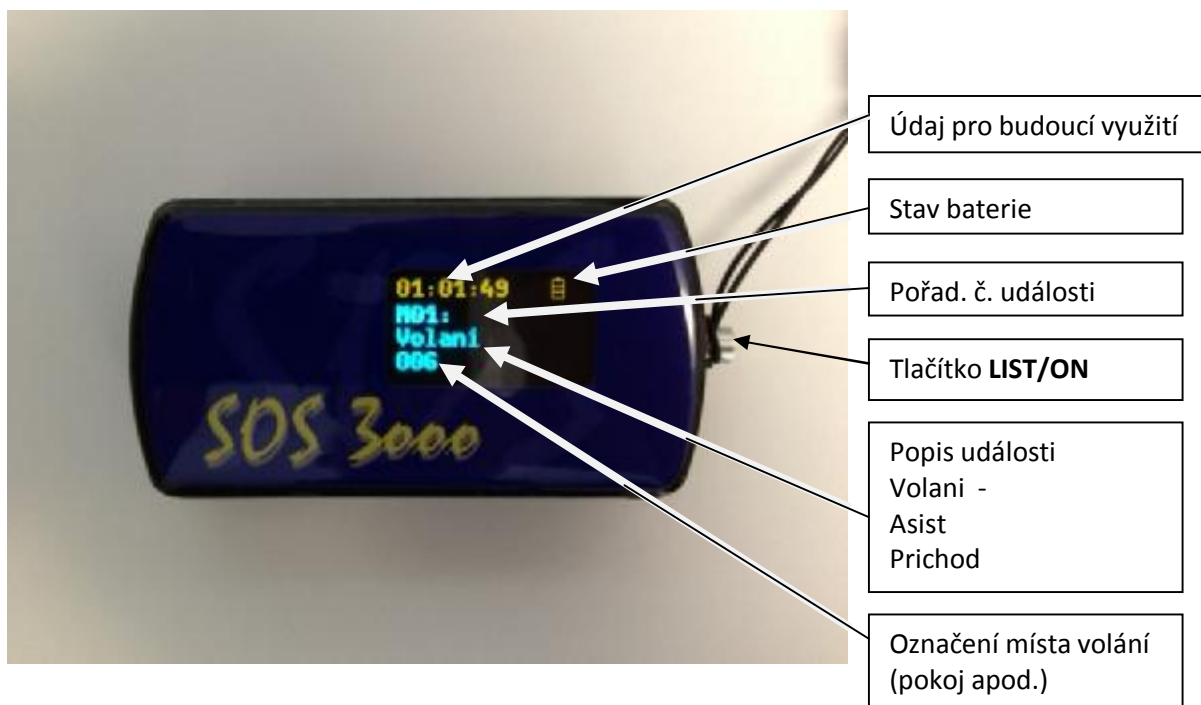

Servis provádí firma DTW Telecom s.r.o., Malešická 16a, 13000 Praha 3
Tel: 255714614 email : hotline@dtw.cz

K zařízením SOS 3000 je vydáno Prohlášení o shodě dle Směrnice 1999/5/EG.